

Acceso del paciente al menú de información para expertos

Si, p. ej., desea consultar por teléfono la versión FW de un aparato o un contador del aparato diferente a N3 (que aparece directamente en el arranque), puede otorgar al paciente un acceso directo al menú de información para expertos. Con este acceso solamente se abre el menú de información, de forma que el paciente no puede realizar ninguna modificación en la configuración. Utilice este acceso directo también si quiere ofrecer al paciente una visión de sus resultados de terapia, como AHI y fuga.

Requisito: el aparato se encuentra en standby.

1. Pulsar la tecla de menú .

Se abre el menú del paciente.



Mantener pulsada la tecla softSTART .

Se abre el menú de información para expertos.

Navegar por los menús

Tecla de función	Descripción
	Ir hacia delante en el menú
	Ir hacia atrás en el menú
	Aumentar valor / cambiar intervalo de tiempo indicado
	Disminuir valor / cambiar intervalo de tiempo indicado
	Confirmar el valor
	Desechar el valor
	Abandonar el menú. Regresar a la pantalla inicial.

CE 0197

**Löwenstein Medical
Technology GmbH + Co. KG**

Kronsaalsweg 40
22525 Hamburgo, Alemania
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.com

WM 68229a · 09/2021 ES (MX)



WM 68229a

Instrucciones de uso resumidas para personal médico especializado

prisma SMART/SOFT

prisma SMART/SOFT plus/max



- 1 Tecla 
- 2 Tecla 
- 3 Tecla Con/Des 
- 4 Tecla de menú 
- 5 Tecla softSTART 



Este documento no sustituye las instrucciones de uso. Encontrará información completa en las instrucciones de uso.

LÖWENSTEIN
medical

LÖWENSTEIN
medical

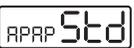
Menú de ajustes para expertos

- Mantener pulsadas simultáneamente la tecla de menú  y la tecla de softSTART .

Se abre el menú de expertos.



Para acceder al menú de ajustes: Pulsar  (tecla )

Parámetro	Descripción	
Modo 	CPAP / APAP	
Modo CPAP: Presión CPAP 	Aquí puede ajustar la presión CPAP.	
Modo APAP:	Presión APAP mínima 	Aquí puede ajustar la presión APAP mínima.
	Presión APAP máxima 	Aquí puede ajustar la presión APAP máxima.
	Dinámica APAP  	Existe la posibilidad de elegir entre dos ajustes distintos para el control APAP: <i>Std (estándar)</i> : Algoritmo APAP conocido: Las apneas e hipopneas se tratan rápidamente y de forma fiable. El aparato reacciona a ronquidos, aplanamiento y RERAs. <i>dYn (dinámico)</i> : Reacción más intensa y más rápida a eventos obstructivos suaves como ronquidos y aplanamiento. La respiración se normaliza más intensamente.
Nivel softPAP 	El alivio de la respiración softPAP es adecuado para pacientes que perciben desagradable la espiración contra una presión elevada. El aparato disminuye provisionalmente la presión de tratamiento en los niveles 1 (alivio de la respiración reducido) y 2 (alivio de la respiración normal) antes de la transición a la espiración. Ponga el softPAP en  para desactivar esta función.	

Parámetro	Descripción
Bloqueo de softPAP 	Aquí puede configurar si el propio paciente puede ajustar el softPAP  o si la función está bloqueada para el paciente  .
autoSTART 	Si está activado autoSTART  el aparato se puede conectar en la mascarilla mediante una respiración (> 0,5 hPa), y al cabo de 5 segundos se desconecta automáticamente con la mascarilla quitada. Ponga el autoSTART en  para desactivar esta función.
Tiempo de softSTART 	Aquí puede ajustar el intervalo de tiempo durante el cual la presión respiratoria aumenta a la presión de tratamiento en el marco del softSTART.
Presión softSTART 	Aquí puede ajustar la presión softSTART. Este parámetro no está disponible, cuando el tiempo de softSTART está cargado  .
Tipo de tubo 	Aquí puede seleccionar el diámetro del tipo de tubo utilizado.
Bloqueo de tipo de tubo 	Aquí puede configurar si el propio paciente ajusta el softPAP  o si la función está bloqueada para el paciente  .
Hora 	Aquí puede ajustar la hora.
Formato indicación de hora 	Aquí puede ajustar si la hora se debe indicar 0 – 24 h  o 0 – 12 h  .
Blue 	Aquí puede activar o desactivar de forma permanente la función de Bluetooth para los pacientes. Solo para los dispositivos plus/max.
Cellular 	Aquí puede activar o desactivar de forma permanente el módem interno para los pacientes. Solo para los dispositivos max.
Borrar datos 	Aquí puede borrar los contadores N1, N2, N3, así como los valores estadísticos del aparato. La configuración del aparato ajustada para el paciente se mantiene.

Menú de información para expertos

- Mantener pulsadas simultáneamente la tecla de menú  y la tecla de softSTART .

Se abre el menú de expertos.



Para acceder al menú de información: Pulsar  (tecla )

Parámetro	Descripción
	Horas de uso (N3)
	El tiempo indicado es el tiempo de terapia medio (sin artefactos y mascarilla abierta) por día en el intervalo de tiempo indicado*
AHI	AHI total medio en el intervalo de tiempo seleccionado*
LEAK	Fuga media en el intervalo de tiempo seleccionado*
P90	Percentil 90 de presión en el intervalo de tiempo seleccionado*
CSR	Respiración de Cheyne-Stokes*
Fw:X	Versión de FW.X designa el número de la versión principal.
H-Fw	Versión de hardware
N1	Horas de terapia sin artefactos y mascarilla abierta
N2	Horas de terapia con humidificador del aire de respiración (sin artefactos y mascarilla abierta)
N3	Horas de uso incl. artefactos y mascarilla abierta
N4	Tiempo de funcionamiento del soplador

* En estos parámetros puede solicitar la indicación de otros intervalos de tiempo con la tecla  y la tecla .

	Último día
	Últimos 7 días
	Últimos 28 días
	Últimos 182 días
	Últimos 365 días

Los datos solo se visualizan si realmente se encuentran en el aparato. Un día de tratamiento comienza y finaliza siempre a las 12 h. Los datos que se registran desde la medianoche hasta las 12 h se asignan al día anterior del calendario.